



H2 Respire 150 Inhalator Wodoru Procedura czyszczenia kwasem cytrynowym

Sposób na czyszczenie na bazie kwasu cytrynowego z nalotów i kamienia jest dedykowany aby sukcesywnie oczyszczać urządzenie H2 Respire min. co 2-3 miesiące zakładając używanie do inhalatora wody

Jeżeli używasz inhalatora H2 Respire od czasu do czasu tym bardziej będzie potrzebne przeprowadzenie procesu oczyszczania z kwasem cytrynowym min. 1x na 2 miesiące.

Procedura czyszczenia:

1.) Całkowicie opróżnij pojemnik inhalatora H2 Respire.

2.) Przygotuj roztwór z kwasem cytrynowym do ok. 550ml wody destylowanej wsyp ok. 10 gram kwasu cytrynowego, dobrze wymieszaj aby kwas całkowicie się rozpuścił. Nigdy nie wsypuj kwasu bezpośrednio do pojemnika inhalatora.

***Zwróć szczególną uwagę aby kwas został dobrze rozpuszczony przez wymieszanie, pozostały kwas w postaci proszku spowoduje uszkodzenie urządzenia !**

****Upewnij się, że do procesu użyjesz WYŁĄCZNIE wody destylowanej.**

3.) Po całkowitym rozpuszczeniu kwasu wlej zawartość roztworu do urządzenia aby osiągnąć wskazanie na poziomie "Max" następnie zakręć nakrętkę.

4.) Dotknij i potrzymaj przycisk On/Off przez ok. 15 sekund aby aktywować proces czyszczenia. Po włączeniu dioda zacznie świecić na czerwono w urządzeniu pojawią się widoczne bąbelki co wskazuje na rozpoczęcie procesu czyszczenia.

5.) Pozwól urządzeniu przeprowadzić pełny cykl czyszczenia trwający ok. 30Min. Po zakończeniu cyklu czyszczenia urządzenie zatrzyma się samodzielnie komunikując ten fakt mrugnięciem diody al;alternatywnie na "czerwono" i na niebiesko.

6.) Odłącz urządzenie z sieci przez wyjęcie wtyczki zasilającej wylej całkowicie roztwór z kwasem (**UWAGA: roztwór nie nadaje się do picia**), następnie przygotuj czystą wodą destylowaną nalej do pojemnika inhalatora, **przekukaj i wylej ponownie wodę.**

7.) W kolejnym etapie napełnij pojemnik urządzenia czystą destylowaną wodą do poziomu "Max" wskazanego na okienku (górna część okienka) i dokręć nakrętkę.. Włącz do zasilania i ponownie uruchom cykl czyszczenia przez naciśnięcie przycisku ON/OFF ok.15 sekund i pozostaw aż urządzenie zakończy pełny proces. Po zakończeniu tego procesu powtórz go raz jeszcze przez włączenie jak i wcześniej cyklu oczyszczania. Ten etap zajmie ok. 30 min. Po zakończeniu odkręć nakrętkę i wylej całkowicie wodę z pojemnika.

8.) Następnie powtórz kroki opisane w pkt. 7 i po zmianie wody destylowanej na czystą i przeprowadź opisany w pkt. 7 cały proces. Po zakończeniu odłącz urządzenie od sieci i koniecznie opróżnij pojemnik.

9.) W ostatnim etapie czyszczenia po 2-3 krotnym czyszczeniu roztworem z kwasem cytrynowym odłącz urządzenie, wylej wodę z pojemnika która była użyta do cyklu czyszczenia. Następnie napełnij wodą czystą wodą destylowaną przepłucz pojemnik czystą wodą destylowaną bez kwasu. Po przepłukaniu napełnij pojemnik czystą wodą destylowaną do poziomu oznaczonego linią "Max" i zacznij ponownie używać urządzenie.