


# H2 RESPIRE 1000

Pure Hydrogen & Oxyhydrogen  
Maszyna do inhalacji

## Instrukcja obsługi

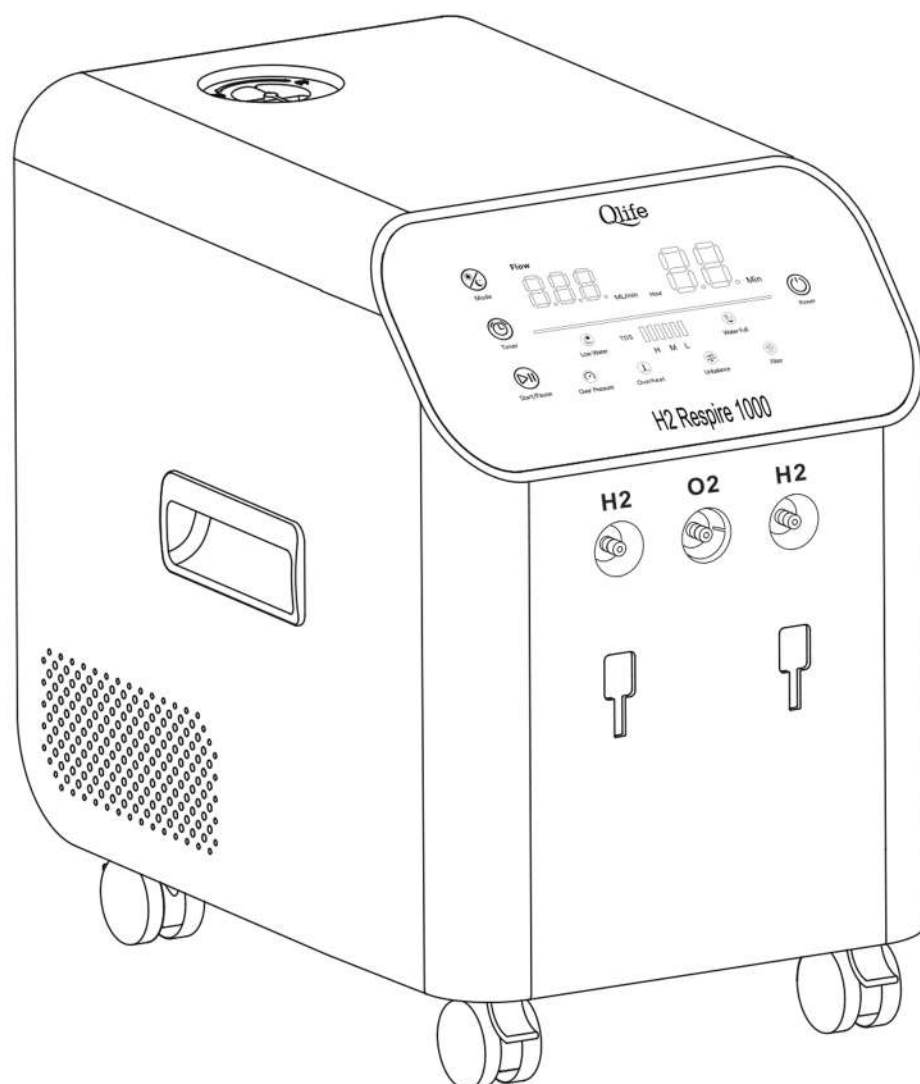

Qlife

Hydrogen Solutions

# SPIS TREŚCI

1. Funkcja i cechy	1
2. Wstęp do produktu	1
3. Podstawowe ustawienia	2
4. Działanie	4
5. Inteligentny czujnik	6
6. Zmiana wody / Odprowadzanie wody	9
7. Połączenia dla wielu użytkowników	10
8. Przygotowywanie wodorowej wody spa do stóp	11
9~10. Konserwacja i specyfikacja	12
11. Ostrzeżenia i środki ostrożności	13
12. Polityka gwarancyjna	15

## 1. FUNKCJA I CECHY



Dwa wyloty wodoru: przepływ H2 ①, przepływ H2 ②, każdy generuje ok. 333 ml/min, i domyślne wyjścia O2 333 ml/min tlenu, Całkowity przepływ gazu wynosi 1000 ml/min.

TDS

Czujnik jakości wody TDS jest wyposażony w funkcję monitorowania jakości wody w zbiorniku w czasie rzeczywistym.



Czujnik alarmu przechyłu maszyny. Wbudowane liczne czujniki zabezpieczające przed przegrzaniem, nadmiernym ciśnieniem i nadmiernym prądem. Super inteligentny i bezpieczny w użyciu.




Wbudowany filtr żywiczny redukujący zanieczyszczenie wody (poziom TDS) w celu uzyskania czystszej i bezpieczniejszego wodoru.

## 2. WSTĘP DO PRODUKTU

### GŁÓWNA JEDNOSTKA

- ① Wyświetlacz funkcji
- ② Panel sterujący
- ③ Wyloty wodoru (H1 i H2)
- ④ Wylot tlenu (O2)
- ⑤ Klamry do butelek nawilżacza H2
- ⑥ Wlot wody czystej/destylowanej
- ⑦ Uchwyty do przenoszenia
- ⑧ Wskaźnik poziomu wody
- ⑨ Otwór spustowy wody
- ⑩ Wejście wyłącznika/kabla zasilającego

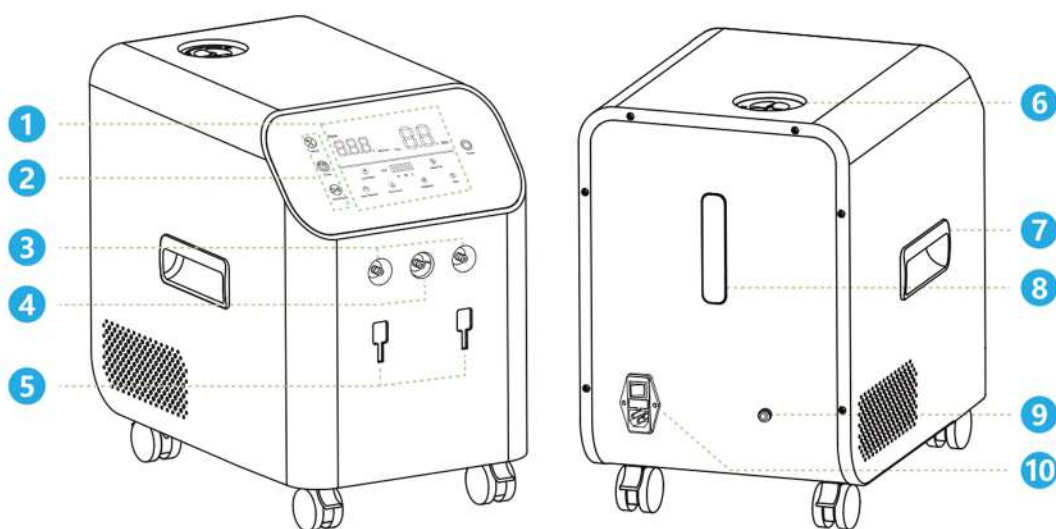

(PRZÓD)


(TYŁ)

## LISTA ELEMENTÓW


Nr	Akcesorium	Liczba	Notatki
1	Główna jednostka	1 szt.	
2	Kaniula do nosa	2 szt.	Materiał eksploatacyjny (Wymieniać co 1-2 miesiące)
3	Butelka z nawilżaczem H2	2 szt.	
4	Wężyk łączący H2 (7 cm)	2 szt.	
5	Filtr żywiczny <small>1 szt. zainstalowany w zbiorniku na wodę 1 szt. jako część zamienna</small>	2 szt.	Materiał eksploatacyjny (Wymieniaj co 6 miesięcy)
6	Wężyk przyłączeniowy gazu (55 cm)	5 szt.	Materiał eksploatacyjny
7	H2 Nano szyft	1 szt.	Do wytwarzania wody H2
8	Złącze w kształcie litery Y	1 szt.	Materiał eksploatacyjny
9	Złącze w kształcie litery X	1 szt.	Materiał eksploatacyjny
10	Kaniula nosowa i zbiornik na wodę (zielony)	1 szt.	Materiał eksploatacyjny
11	Rurka spustowa	1 szt.	
12	Instrukcja obsługi	1 szt.	
13	Bezpiecznik	2 szt.	1 szt. zainstalowana w wyłączniku zasilania 1 szt. jako część zamienna
14	Przewód zasilający	1 szt.	

### 3. PODSTAWOWA KONFIGURACJA


Napełnij butelki nawilżacza H2 odpowiednią ilością wody destylowanej (pomiędzy poziomem Min. i Max.).

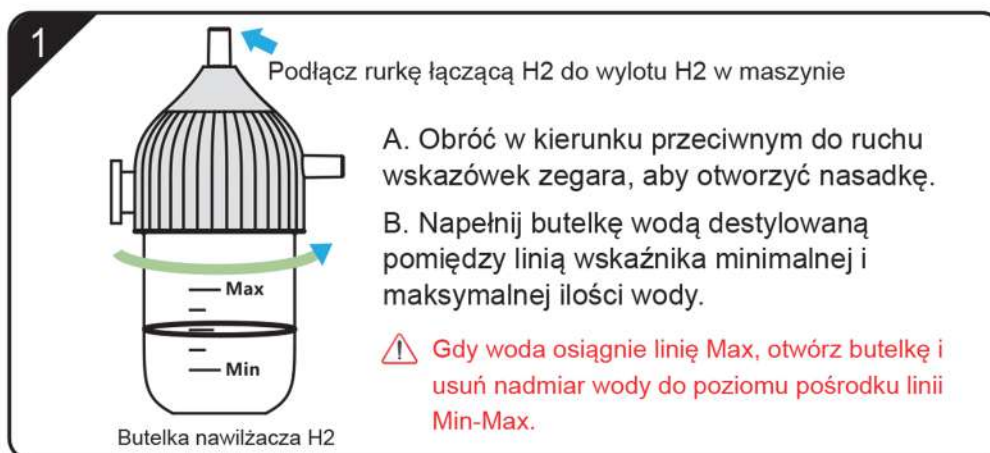

Podłącz jeden koniec wężyka łączącego H2 do wylotu H2 (H2) w maszynie, a drugi koniec do górnego wlotu nawilżanej butelki.

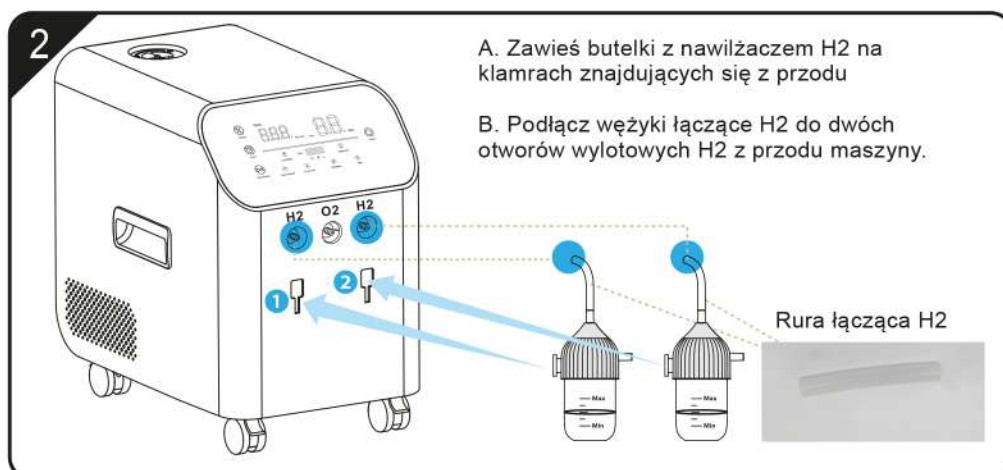

Podłącz wężyk kaniuli nosowej do wyjścia butelek nawilżacza.

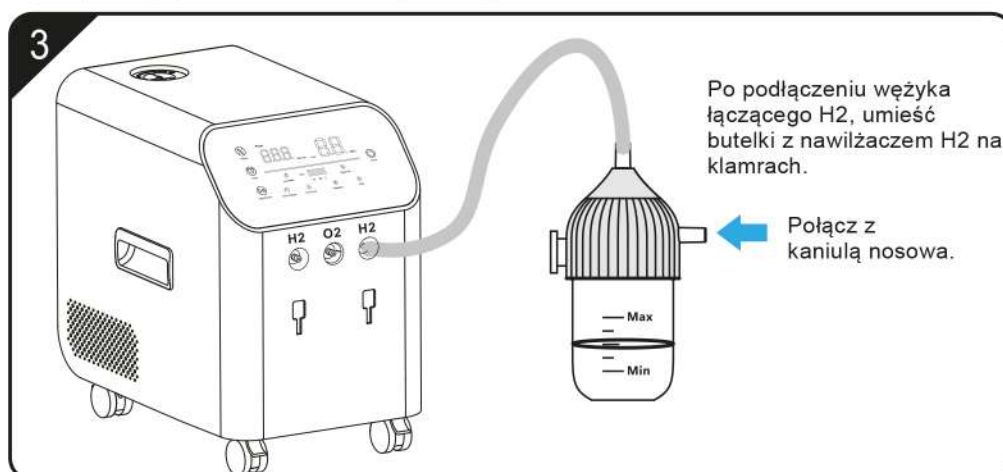


Podłącz kabel zasilający do urządzenia, a następnie podłącz go do gniazdka ściennego.




Napełnij zbiornik na czystą wodę destylowaną lub czystą wodę demineralizowaną do linii „Wskaźnik Max”. (Maksymalny poziom wody wynosi około 2,6 litra) i zakręć korek zbiornika wody.

**Czujnik jakości TDS użytej wody nie powinien przekraczać 3ppm.**

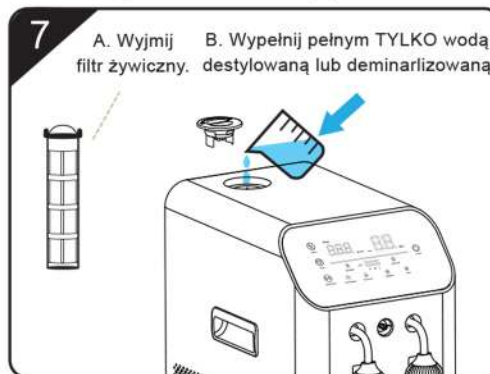


## 4. DZIAŁANIE

- 1 Podłącz wyloty H2 do kaniuli nosowej za pomocą złącza Y

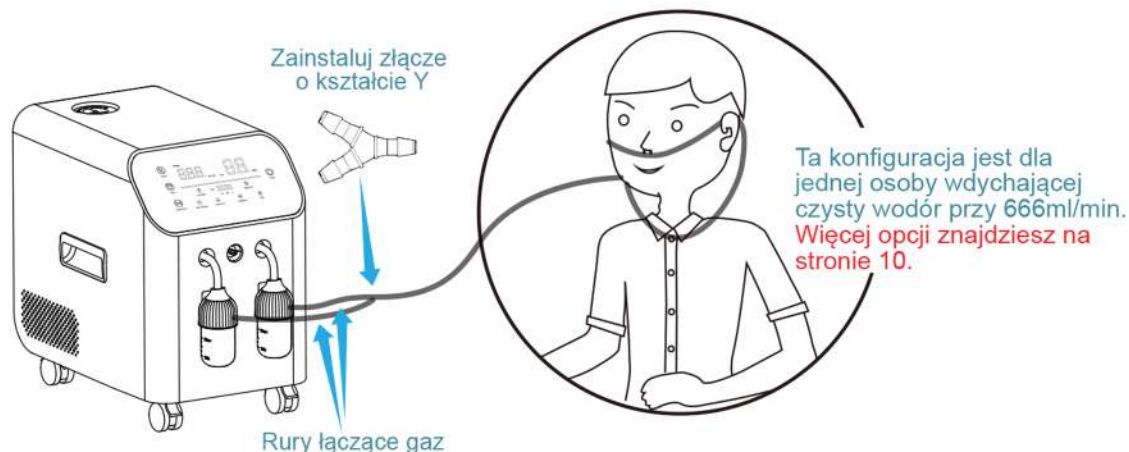


Przejdź do strony 10, aby zobaczyć konfiguracje: tlenowo-wodorowe (gaz Browna) oraz dla wielu użytkowników.

- 2** Panel wyświetlacza zaświeci się po włączeniu zasilania.

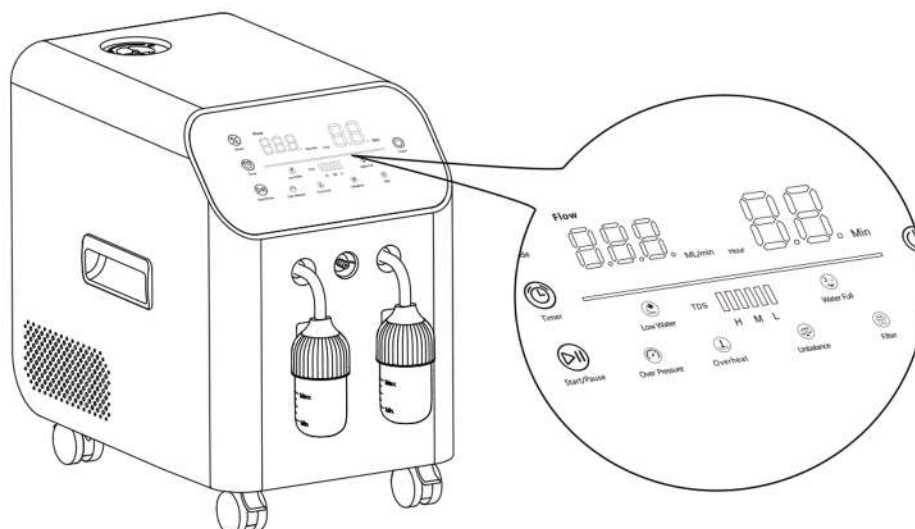


- 3** Dotknij przycisk „Timer”, aby ustawić czas pracy: 30, 60, 90 minut, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 godzin.

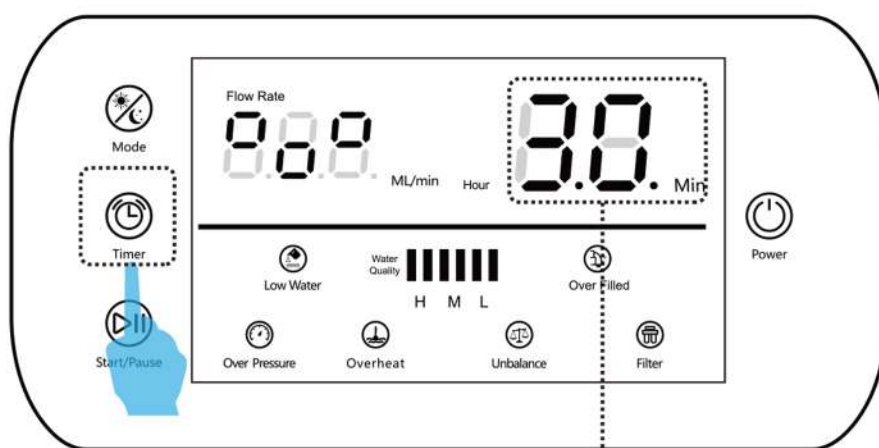

Wyświetlacz czasu

- 4** Dotknij przycisk Start/Pauza, aby uruchomić maszynę; Dotknij przycisk ponownie, aby wstrzymać lub zatrzymać.

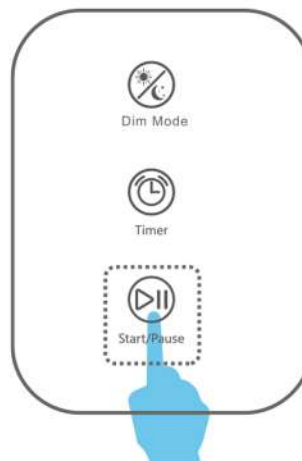

## 5. INTELIGENTNY CZUJNIK


### 1 Wskaźnik niskiego poziomu wody

Migająca ikona „Low water” oznacza, że poziom wody w zbiorniku jest niższy niż „Min”. Urządzenie automatycznie przestanie działać, gdy poziom wody spadnie poniżej poziomu „Min” i wyda natychmiastowy sygnał dźwiękowy. Dodaj czystą/destylowaną wodę do linii poziomu wody „Max”.



### 2 Wskaźnik przepełnienia

Migająca ikona „Over Filled” na wyświetlaczu oznacza, że poziom wody w zbiorniku jest wyższy niż poziom „Max”, a zbiornik na wodę będzie migać niebieskim światłem, wskazując, że w zbiorniku jest za dużo wody. Odlej trochę wody i napełnij ją do poziomu poziomu wody „Max”.

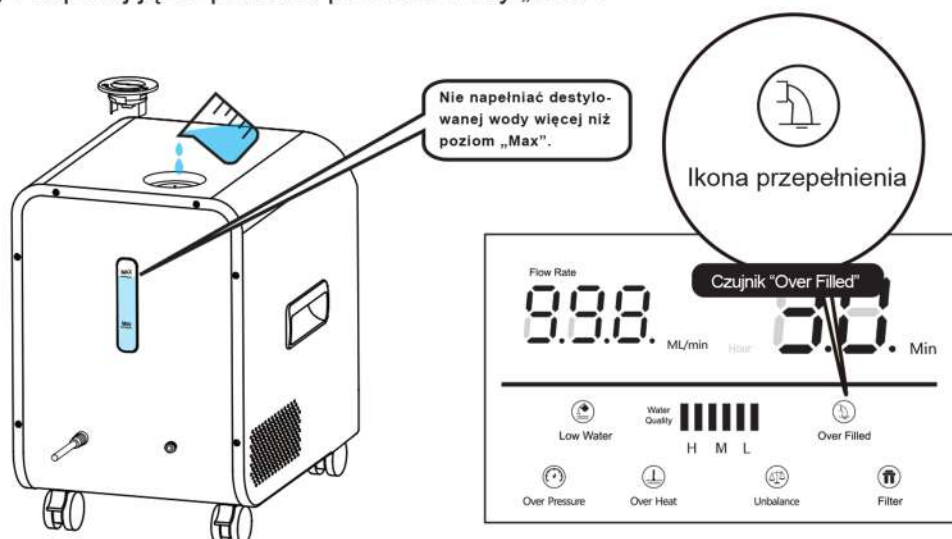

### 3 Wskaźnik nadmiernego ciśnienia

Gdy kaniula nosowa jest złożona to następuje nieprawidłowy przepływ gazu. To powoduje wzrost ciśnienia w maszynie. Maszyna przestanie działać i zacznie migać ikona „Over Pressure”. Sprawdź, czy kaniula nosowa jest prosta, a następnie potrząśnij i wysusz wodę w wężykach. Pamiętaj o regularnej wymianie kaniuli nosowej, aby uniknąć problemów związanych z nadmiernym ciśnieniem.






#### 4 Wskaźnik braku równowagi

Ikona "Unbalance" miga, gdy maszyna jest przechylona lub nie stoi na płaskiej powierzchni, a długi sygnał dźwiękowy będzie emitowany do czasu, aż maszyna zostanie położona płasko.



#### 5 Wskaźnik przegrzania


Gdy wewnętrzny moduł produkcyjny H2 ulegnie przegrzaniu, maszyna przestaje działać, aby chronić urządzenie oraz zaczyna migać ikona „Overheat”. Poczekaj, aż maszyna ostygnie, a następnie ponownie rozpocznij pracę. Zaobserwuj, czy wydzielanie gazu H<sub>2</sub> w nawilżanej butelce jest normalne. Jeśli jest nieprawidłowe, spuść całą wodę ze zbiornika i dodaj nową wodę destylowaną, aby przyspieszyć proces chłodzenia, a następnie uruchom ponownie maszynę.

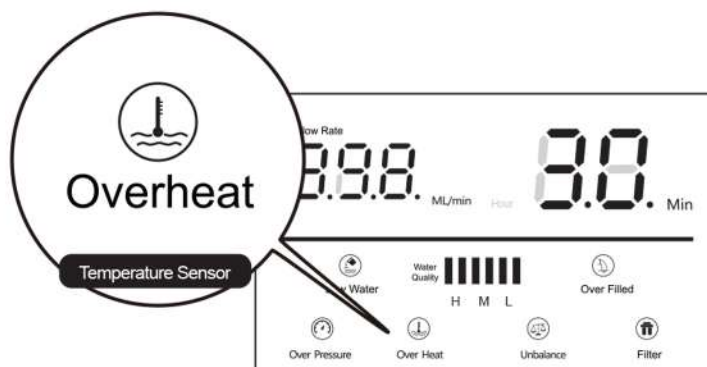

#### 6 Wskaźnik jakości wody (TDS)

W zbiorniku na wodę wbudowany jest czujnik jakości wody TDS, który monitoruje jakość wody w czasie rzeczywistym. Jakość wody ma trzy stopnie: wysoką (H), średnią (M) i niską (L), z odpowiednimi kolorami zielonym, żółtym i czerwonym. Migająca kolorowa ikona wskazuje aktualny poziom jakości wody. Maszyna przestaje działać, gdy jakość wody jest niska (czerwona). Zmień zbiornik na wodę czystą/destylowaną i uruchom ponownie urządzenie, gdy jakość wody powróci do poziomu Wysoka (zielona).

Pamiętaj o regularnej wymianie filtra żywicowego.

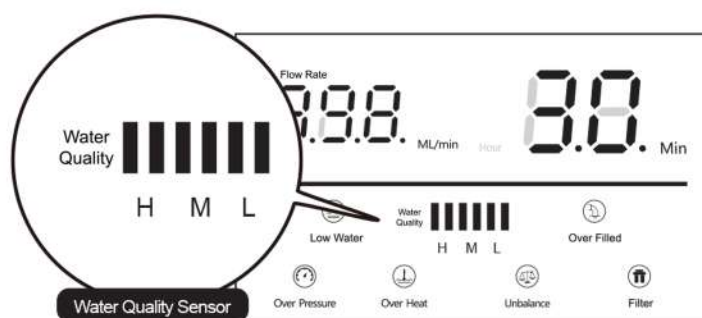

## 7 Wymiana filtra żywiczy

Ikona „Filter” miga, gdy urządzenie przepracuje 700 godzin lub ok. 3-6 miesięcy. Wymień filtr żywiczny w zbiorniku na wodę, wykonując następujące czynności:

- ① Odkręć pokrętkę zbiornika na wodę (Fig. 1).
- ② Wyjmij filtr żywiczny, wyciągając go (Fig. 2).
- ③ Wymień na nowy filtr żywiczny (Fig. 3) .
- ④ Włóż nowy filtr żywiczny i mocno dokręć pokrętkę zbiornika wody (Fig. 4).
- ⑤ **Aby zresetować wskaźnik filtra:** Włącz zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Tryb”, aż usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy.





## 6. ZMIANA WODY / ODPROWADZANIE WODY

Zaleca się spuścić wodę ze zbiornika wody i dokonać wymiany na nową, świeżą wodę destylowaną **co najmniej 2 razy w miesiącu** w następujących

- Długie podróże
- Przegrzanie
- Poziom wody przekroczył maksymalny
- Dodano niewłaściwą wodę (niska jakość wody TDS.)
- Kiedy maszyna pracuje, nie wytwarza się gaz i wyświetlana jest ikona błędu „Err”.

### JAK ODPROWADZAĆ WODĘ:


1. Odłącz przewód zasilający.

2. Przygotuj wiadro, podłącz wężyk spustowy. (Prawy rysunek)

A. Odkręć korek otworu spustowego.

B. Wyciągnij silikonową zatyczkę.

C. Podłącz wężyk spustowy do otworu spustowego

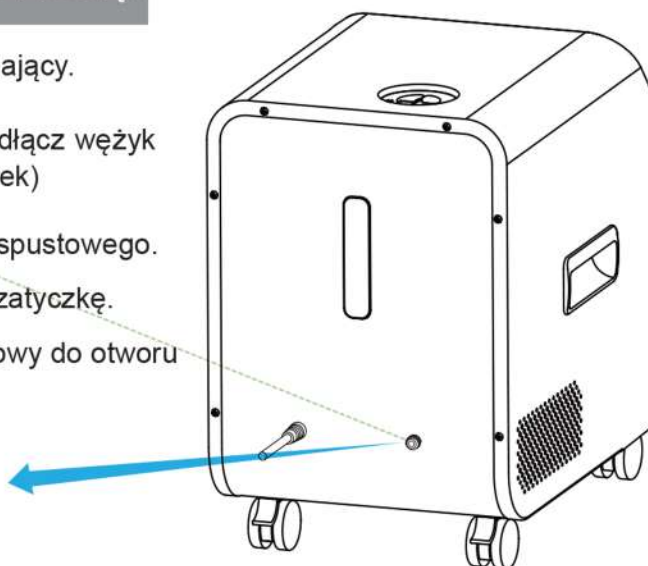

Odkręć górną pokrywę zbiornika na wodę. Woda zacznie wypływać. Po całkowitym opróżnieniu zbiornika na wodę włóż ponownie silikonową zatyczkę i zakręć korek otworu spustowego.

**Uwaga:** Przechowuj wężyk spustowy w miejscu, w którym będzie można go znaleźć do wykorzystania w przyszłości.

## 7. POŁĄCZENIE DLA WIELU UŻYTKOWNIKÓW

### Połączenia wyjściowe przepływu wodoru/tlenu


**UWAGA: ZAKAZANE JEST UŻYWANIE INHALATORA W POBLIŻU ŹRÓDŁA OGNIA LUB ISKIER**

 Odkręć zwilżone butelki i wylej nadmiar wody, gdy poziom wody osiągnie linię wskazującą „Max” na zwilżonych butelkach.

Dla 1 osoby  
(Tlenowodór)

Rysunek przepływu:


Inhalacja tlenowo-wodorowa dla jednej osoby o przepływie 1000 ml/min (Mieszanie wodoru i tlenu)

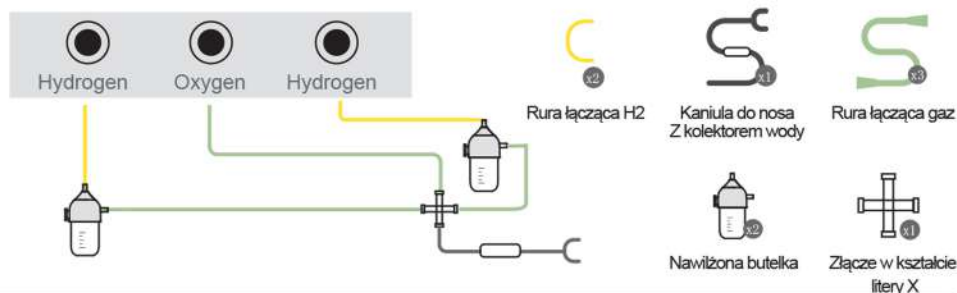

Dla 2 osób  
(Czysty  $H_2$ )

Rysunek przepływu:


Jedna osoba wdycha dwie dawki wodoru o przepływie 666 ml/min, inna osoba wdycha tlen o przepływie 333 ml/min.)

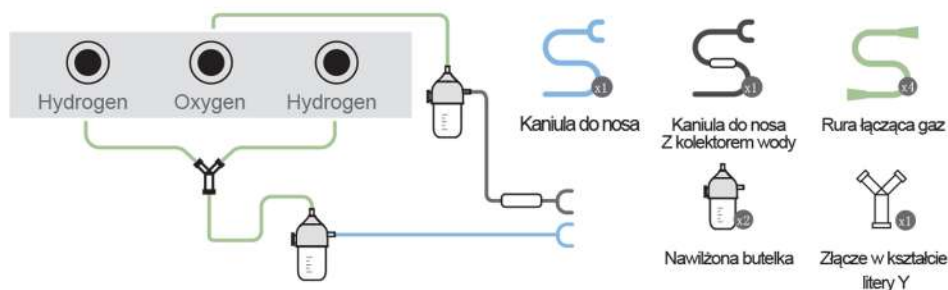

Dla 3 osób  
(Czysty  $H_2$ ,  $H_2$ ,  $O_2$ )


Rysunek przepływu:

Dwie osoby wdychają wodór indywidualnie, za pomocą dwóch oddzielnych wylotów (każda o przepływie 333 ml/min), trzecia osoba wdycha tlen o przepływie 333 ml/min.

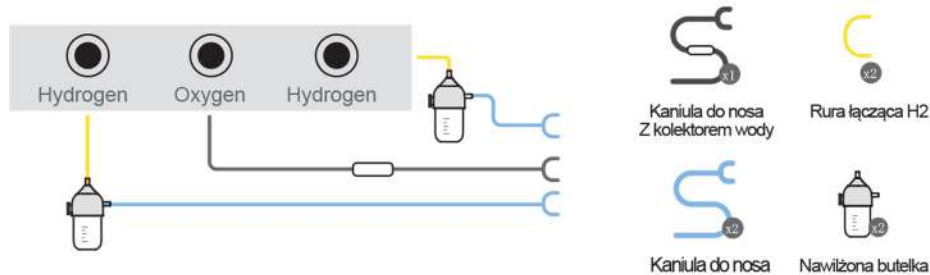


## 8. PRZYGOTOWYWANIE WODOROWEJ WODY I SPA DLA STÓP

Podłącz wężyki łączące gaz do wylotów gazu H2 poprzez nawilżone butelki, a drugi koniec do złącza w kształcie litery Y, a wężyk łączący gaz bezpośrednio do drążka H2 Nano. Włóż pałeczkę H2 Nano do szklanki wody (300~500 ml) i włącz urządzenie. Podczas procesu będzie widoczne powstawanie nanopęcherzyków wodoru. Wyłącz urządzenie po 10–15 minutach i ciesz się wodą wzbogaconą w wodór.

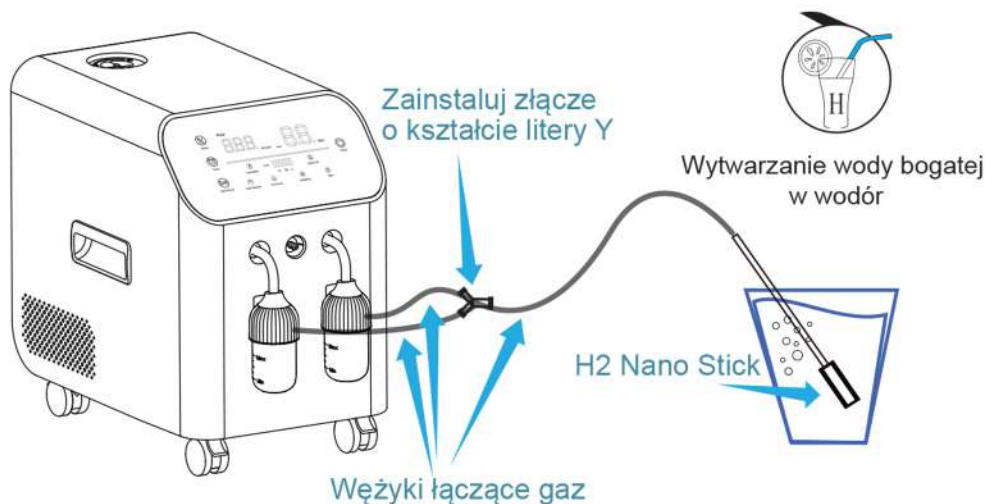

Wspieranie za pomocą molekularnego wodorowego spa to świetny sposób na zneutralizowanie uszkodzeń skóry wywołanych przez wolne rodniki, a H2 wnika głęboko w ciało. Podłącz wężyk łączący do wylotu gazu H2, a drugi koniec do nano pałeczki H2 w zbiorniku z wodą z 3-5 litrami wody. Następnie uruchom urządzenie na co najmniej 20-30 minut i poddaj się zabiegowi H2 Spa. Aby uzyskać jeszcze lepsze rezultaty, utrzymuj maszynę włączoną podczas wykonywania spa.

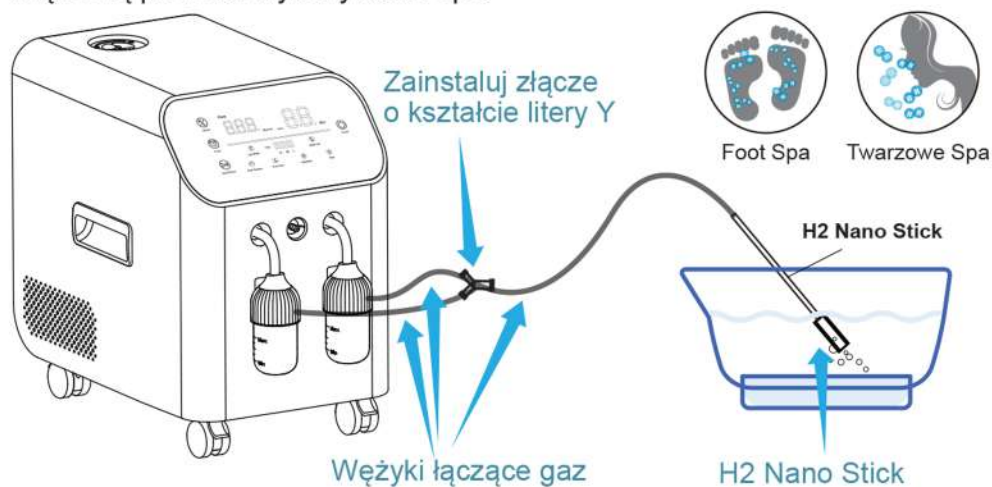

## 9. KONSERWACJA

Ponieważ H2 Respire 1000 wykorzystuje czystą lub destylowaną wodę, konserwacja urządzenia w normalnych warunkach i użytkowaniu jest minimalna. Czasami jednak, jeśli zauważysz, że Twoje urządzenie nie wytwarza normalnie H2 lub nie działa optymalnie, może to oznaczać konieczność serwisu, czyszczenia lub konserwacji

Jeśli doświadczasz któregoś z poniższych problemów z urządzeniami:

- Wytwarzanie wodoru jest słabsze.
- Urządzenie nie wytwarza wody wodorowej.
- W butelkach nawilżacza nie znajdują się bąbelki.

Skontaktuj się z zespołem wsparcia Qlife pod adresem [Support@Qlifetoday.com](mailto:Support@Qlifetoday.com)

## 10. SPECYFIKACJA

<b>Nazwa produktu</b>	H2 Respire 1000 Pure Hydrogen OxyhydrogenInhaler	<b>Zbiornik wodny</b>	2.6 L	<b>Funkcja maszyny</b>	Inhalacje H2 / wody H2 / Spa H2
<b>Model</b>	H2R-1000	<b>Czystość wodoru</b>	99.9%	<b>Przepływ wodoru</b>	666 ml/min
<b>Wymiar</b>	250x390x390mm	<b>Napięcie znamionowe mocy</b>	180W/50Hz 100~240V	<b>Waga netto</b>	11 kg (24 lbs)

## 11. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Do tego urządzenia należy używać WYŁĄCZNIE czystej wody (wody demineralizowanej) lub wody destylowanej. Używanie innej wody o gorszej jakości lub zawierającej minerały może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Wyłącz wyłącznik zasilania z tyłu urządzenia, aby całkowicie wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane, i przedłużyć żywotność urządzenia.
- Przy pierwszym użyciu inhalatora H2 nie należy wykonywać inhalacji dłużej niż 30 minut dziennie. Gdy organizm przyzwyczai się już do oddychania gazowym H2, stopniowo zwiększaj całkowity czas do większej liczby godzin.
- Zaleca się wymianę kaniuli nosowej co 1–2 miesiące w zależności od częstotliwości użytkowania. Każda kaniula donosowa powinna być przeznaczona dla jednej osoby ze względów higienicznych.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy spuścić większość wody i pozostawić w urządzeniu około 100~200 ml wody destylowanej, aby elektroda była nawilżona i aby działała prawidłowo, gdy nadejdzie czas ponownego użycia.
- To normalne, że w nowym urządzeniu znajduje się woda. Woda w zbiorniku na wodę ma za zadanie chronić i nawilżać elektrodę w urządzeniu. Ta woda w zbiorniku na wodę jest w 100% czystą, czystą wodą destylowaną.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych chłodzących, gdy maszyna jest uruchomiona. Upewnij się, że urządzenie działa w chłodnym i wentylowanym pomieszczeniu.
- Jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa niż 5°C, przed użyciem maszynę należy umieścić w temperaturze pokojowej na 24 godziny.
- Dzieci ani osoby posiadające jakiegokolwiek doświadczenie nie powinny obsługiwać urządzenia bez nadzoru i pozwolenia.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj maszyny. Wszelkie ingerencje, modyfikacje lub niewłaściwe użytkowanie spowodują unieważnienie gwarancji.
- Producent nie zaleca używania okularów do wodorowania oczu i uszu na obydwu wylotach gazu H2 wodoru, używaj okularów H2 wyłącznie na 1 wylocie.
- Wg dostępnych danych inhalacje głównie gazem wodorowym oraz inhalacje tlenu powinny być konsultowane z lekarzem.

- Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze zachować środki ostrożności.
- Upewnij się, aby urządzenie nie było narażone na bezpośredni działanie urządzeń emitujących ciepło lub promieni słonecznych.
- Przed podłączeniem sprawdź, czy napięcie stosowane w miejscu użycia jest prawidłowe do wskazanego w specyfikacji.
- Nie podłączaj i nie pozostawiaj urządzenia do zasilania jeśli w pomieszczeniu jest zbyt duża wilgotność i w pobliżu źródeł ognia.
- Nie zanurzaj urządzenia w jakimkolwiek płynie lub wodzie.
- Koniecznie odłącz kabel zasilający ładowarki przed jego oczyszczeniem.
- Nie dozwolone jest samodzielne używanie urządzenia przez dzieci oraz osoby do tego nie uprawnione.
- Zachowaj szczególną ostrożność jeśli urządzenie jest używane w pobliżu pobytu dzieci.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci.
- Wszelkie naprawy urządzeń elektrycznych powinny być wykonane przez wykwalifikowany personel. Jakikolwiek samodzielne naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Urządzenie jest przewidziane do prywatnego użytku, w domu, w podróży, w biurze, na zewnątrz. Urządzenie nie jest przewidziane do zastosowań przemysłowych lub komercyjnych.
- Nigdy nie używaj tego urządzenia z uszkodzonym portem USB,
- Używaj tego urządzenie w przewidzianym celu opisanym w instrukcji. Inne zastosowania niż przewidziane są niedozwolone.
- Urządzenie H2 Respire 1000 nie jest zabawką.



## 12. POLITYKA GWARANCYJNA

- Od daty zakupu Qlife udziela rocznej gwarancji na produkt.
- Z gwarancji można skorzystać podając numer seryjny wraz z dowodem zakupu (faktura i historia transakcji płatniczych)
- Następujące warunki nie są objęte gwarancją:
  - Produkt został zakupiony od nieautoryzowanych sprzedawców lub nieautoryzowanych sprzedawców internetowych.
  - Demontaż lub modyfikacje produktu powodują automatyczną utratę gwarancji.
  - Uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie spowodowane upuszczeniem podczas użytkowania lub uszkodzenia spowodowane transportem produktu.
  - Uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie jest spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem produktu.
  - Uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie spowodowane niewłaściwą konserwacją lub przechowywaniem produktu
  - Produkt został naprawiony przez nieautoryzowany serwis lub technika.
- Przed wysłaniem produktu do naprawy prosimy o kontakt z działem serwisu Qlife lub autoryzowanym sprzedawcą Qlife w celu uzyskania roszczeń gwarancyjnych i instrukcji.

Obsługa klienta: **Support@Qlifetoday.com**

## 13. INFORMACJE DODATKOWE

Wg dostępnych danych inhalacje głównie gazem wodorowym, inhalacje tlenu powinny być konsultowane z lekarzem. Tlen powinien być inhalowany pod kontrolą. Badania inhalacji gazem wodorowym H<sub>2</sub> wskazują na działanie terapeutyczne tego gazu. Na temat inhalacji połączenia gazu H<sub>2</sub> z tlenem nie ma wielu badań i jego używanie jest na odpowiedzialność użytkownika. Bez wskazanej potrzeby nie zalecamy inhalacji tlenem.

# Jonizatory.eu

Wyłączny dystrybutor międzynarodowej  
marki generatorów Qlife

E-mail: [kontakt@jonizatory.eu](mailto:kontakt@jonizatory.eu)

Qlife

Hydrogen Solutions

[www.qlifetoday.com](http://www.qlifetoday.com)